



INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU KRWI NA BADANIE AZF

ZASADA POBRANIA KRWI

Krew powinna być pobrana w Punkcie Pobrań przez uprawnione osoby.

Należy zastosować ogólnie przyjęte procedury pobierania krwi stosowane w Punktach Pobrań.

1. Pacjent może być po posiłku.
2. Pacjent nie może mieć przetoczeń krwi przez co najmniej 6 miesięcy (jeżeli tak - należy poinformować o tym EUROIMMUN DNA).
3. Pobrać należy co najmniej 5 ml krwi obwodowej do jałowej probówki z EDTA (najlepiej firma Sarstedt – różowy korek).
4. Delikatnie wymieszać zawartość probówki, opisać ją (imię, nazwisko, data urodzenia/PESEL pacjenta).
5. Pobraną próbkę krwi w razie konieczności należy przechowywać w temp. 6-10OC i w ciągu 24 godzin.
6. Probówki przeznaczone do transportu należy zabezpieczyć np. zapakować do pojemników steropianowych lub nieprzemakalnych woreczków foliowych.
7. Do pobranej próbki należy dołączyć wypełniony formularz zlecenia na badanie molekularne z krwi obwodowej.
8. Przygotowaną przesyłkę wysłać za pośrednictwem firmy przewozowej (kurier) do Laboratorium EUROIMMUN DNA.
9. Termin realizacji badania wynosi do 20 dni od dnia dostarczenia materiału do Laboratorium EUROIMMUN DNA.